



BRUKERMANUAL

INNHALDSFORTEGNELSE

1.0. INNLEDNING	3
1.1. SIKKERHET	4
1.2. GARANTI	4
1.3. UTPAKKING AV STOLEN	4
1.4. VEDLIKEHOLDEL AV VELA SAMBA 410	5
1.4.1. Hjul	5
1.4.2. Stell	5
1.4.3. Polstret	5
1.5. BRUKERMANUAL VELA SAMBA 410	6
1.6. TEKNISK DATA	7

1.0. INNLEDNING

KJÆRE KUNDE

Vi vil gjerne takke deg for kjøpet av VELA Samba 410. Vi er sikker på at den blir til daglig glede for deg.

Brukermanual omhandler nyttige opplysninger om innstilling, betjening, vedlikehold, tekniske data o.a.

VIKTIG

Vennligst les denne brukermanualen grundig og gjem den til senere bruk. Den bør alltid være til rådighet for brukeren. Denne brukermanualen bør alltid følge stolen.

Den kan også finnes på VELAs hjemmeside: www.vela.eu

En del av stolens materiale kan resirkuleres. Lever stolen til VELAs distributør, ETAC, eller din lokale gjenbrugsstasjon.

Har du spørsmål, kan du kontakte VELAs distributør i Norge, ETAC.

Du kan også finne informasjon om VELA Samba 410 på VELAs hjemmeside: www.vela.eu
VELA forbeholder seg retten til endringer.

VELA / Vermund Larsen A/S

Gøteborgvej 12
9200 Aalborg
Danmark
www.vela.eu

DISTRIBUTØR I NORGE:

ETAC AS
N-1503 Moss
Tlf 815 69 469
www.etac.no

1.1. SIKKERHET

Denne stolen er CE-merket og overholder alle gjeldende EU-regler. Stolen er produsert av VELA, Vermund Larsen A/S, Goeteborgvej 12, 9200 Aalborg SV, Danmark.

Formålet med VELA Samba 410 er en stol til sittende personer og maksimal brukervekt er 95 kg

1.2. GARANTI

VELA gir 24 md. garanti. Garantien gjelder kun ved bruk av originale reservedeler og tilbehør, samt tilpasninger foretatt av en autorisert servicetekniker.

VELA påtar seg ikke ansvar for skader på produktet eller brukeren som har oppstått pga.:

- Transport
- Misbruk
- Vanlig slitasje
- Feil bruk
- Bruk av uoriginale reservedeler og tilbehør
- Tilpasninger foretatt av uautorisert servicetekniker

Ved henvendelse om stolen kan den identifiseres ut i fra produktspesifikasjonen som finnes under setet.

1.3. UTPAKNING AV STOLEN

VELA Samba leveres i miljø- og brukervennlig pappemballasje.

Hvis det er feil, mangler eller transportskade på produktet skal leverandøren kontaktes. Du må ikke forsøke å reparere ev. skader selv eller ta i bruk stolen.



Den kassen stolen leveres i skal inneholde:

- 1 stol
- 1 brukermanual (denne)

STOLEN ER UMONTERT OG MONTERES SAMMEN PÅ FØLGENDE MÅTE:

1. Sett gasspatronen ned i hullet på understellet
2. Sete monteres på gasspatronen

Viktig ! Gasspatronen må presses ned i understellet så den sitter fast.

1.4. VEDLIKEHOLD AV VELA SAMBA 410

Vi anbefaler et årlig ettersyn av VELA Samba for å finne f.eks. defekte og slitte deler. Man bør selv etterjustere de avtakbare delene regelmessig.

1.4.1. HJUL

Det anbefales å undersøke hjul og rense dem for eventuelle trådrester etc. med jevne mellomrom.

1.4.2. STELL

Vask med lunkent vann ev. tilsatt et pH-nøytralt oppvaskmiddel.

1.4.3. SØYLE

Dersom stolen, etter noen års bruk, føles litt treg i høydereguleringen og fjæring, vil en smøring av innerrøret med syrefri olje være fordelaktig.

Utskifting av gassfjæren utføres av leverandøren, eller av en fagkyndig person.

1.4.4. POLSTRET

Stoftrekket er som standard 100% Travira med kunstleder på bunden. Flekker fjernes ved bruk av en myk børste og vaskemiddel.



1.5. BRUGERMANUAL VELA SAMBA 410

Når du sitter er det viktig at du beveger ryggen
Juster høyden på stolen slik at du får hel fotsålen i gulvet.

Beveg overkroppen i forskjellige retninger, svaie fram og tilbake og derved vekse mellom strekk og bøy i musklene. Kjenn etter hvor mye du klarer



◀ 1.5.1. SITTEHØYDE

Høyden på VELA Samba 410 justeres ved hjelp av gassfjær. Dette gjør man ved å trekke i håndtaket.

Utskifting av gassfjæren utføres av leverandøren, eller av en fagkyndig person.



◀ 1.5.2. PUTEN KAN TAS AV

Puten på Vela Samba 410 kan enkelt tas av. Den er festet med velcro bånd. Det gir deg en mulighet får å ta med deg puten, så du kan anvende den i bil, på møter og andre steder

Mann bør ikke sitte på krakken uten pute.

1.7. TEKNISK DATA

KONSTRUKSJON:

- Alu understell, slik at alle hjul har kontakt også på ujevnt gulv.
- Hvert hjul er festet med en hjultapp i tårn
- Ytterrør i lakkert aluminium
- Manuell seteregulering

	VELA Samba 410
Sete	47 x 36 cm 44 x 34 cm
Sittehøyde	42-57 cm 49-69 cm 60-86 cm
Understell	50 cm
Vekt	5 kg
Kapasitet	95 kg



VELA · Gøteborgvej 12 · 9200 Aalborg SV · Danmark · Tlf: +45 96 34 76 00 · mail@vela.dk · www.vela.eu

VELA Samba 410 N/ 2-2009