



Nova Mobil Personløfter – fleksibel og brukervennlig

Personløfteren som brukes i de fleste løftesituasjoner. Personløfteren er lett å manøvrere og flytte fra rom til rom. Den ergonomiske og stabile konstruksjonen gjør produktet til et trygt hjelpemiddel for den som skal løftes, og for den som hjelper til.

Smart, enkel og ergonomisk

Nova Mobil Personløfter hjelper brukere med nedsatt styrke og bevegelse til å forflytte seg. Personløfteren er et hendig hjelpemiddel som brukes ved forflytninger fra seng, gulv, toalett og rullestol. Produktets gjennomtenkte utforming gjør at den passer inn i de fleste miljøer, er lett å holde ren, føles trygg og sikker i bruk. Løfteren betjenes med en håndkontroll, har elektrisk benregulering og stort løfteområde.



Løftearm med stort løfteområde

Dette gjør det enkelt å løfte fra gulv.

Trinnløs benregulering

Løfteren har elektrisk, trinnløs V-benregulering.

Lett å manøvrere

Hjulene ruller lett ved forflytning og er låsbare.

Løfteren har et rent design som kombinerer tiltalende former med god ergonomi.

| HMS Art.nr. | Art.nr. | Artikkel |
|-------------|----------|-----------------------------|
| 162637 | 16020102 | Nova 300 Mobil Personløfter |

Teknisk informasjon

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Maks brukervekt: | 180 kg |
| Løfteområde: | 42-177 cm |
| Antall løft med 80 kg: | ca 80 (batteriets kapasitet) |
| Understellets bredde: | 64-108 cm (utv), 52-96 cm (innv) |
| Understellets høyde: | 14,5 cm |
| Understellets lengde: | 110 cm |
| Venderadius: | ca 126 cm |
| Totalvekt produkt: | 42 kg |
| Ramme: | pulverlakkert stål |



Riktig bøyle gir økt stabilitet og komfort

Fire ting avgjør valget av løftebøyle: Brukerens bredde og vekt, fysisk status og hvilken type løfter som benyttes.

Riktig bøyletype gjør ikke bare løftet mer behagelig for brukeren, men gjør det også sikrere og mer stabilt. Bøylens bredde påvirker løftet og størrelsen må stemme med brukerens skulderbredde for å oppnå et jevnt og sikkert løft. Hvis brukeren er utrygg kan en smalere bøyle holde løftet mer samlet, og dermed skape større trygghet. Er bøylen for bred for brukeren kan løftet føles ustabil. Nova bøyler er markedets letteste bøyler. De er enkle å håndtere og rengjøre. Alle bøyler har en hurtigkoplring som gjør det enkelt å bytte modell. Samtlige bøyler kan benyttes på takløfter, friløfter og mobil personløfter.



2-punktsbøyle Small 30 cm bred.

HMS Art nr. 162716
Art.nr. 81560



2-punktsbøyle Medium 45 cm bred.

Art.nr. 81561
Leveres som standard med Nova 300



2-punktsbøyle Large 50 cm bred.

HMS Art nr. 162717
Art.nr. 81562



Kryssbøyle Small 50 x 25 cm

HMS Art nr. 162718
Art.nr. 81563



Kryssbøyle Large 50 x 40 cm.

HMS Art nr. 162719
Art.nr. 81564



Bøyholder

HMS Art nr. 162720
Art.nr. 81568

Kryssbøylen brukes når man ønsker større avstand mellom løfteseilet ben og ryggbånd. Fire kroker gir løftet ekstra stabilitet. Samtidig fordeles vekten over en større flate, noe som bidrar til økt komfort.

Den store modellen åpner hoftewinkelen ytterligere, i forhold til den lille kryssbøylen.

Denne kryssbøylen gir generelt større bakoverhelling i seilet.

Holder til å feste på veggen for oppbevaring av bøyler og seil.

Et løfteprogram utviklet for pleiere

Hver tredje anmeldte arbeidsskade innen pleie- og omsorgsyirket er forårsaket av tunge løft. Det forklarer hvorfor 7 av 10 pleiere opplever sitt arbeid som tungt. Det vil vi endre på.

I samarbeid med pleiere har vi utviklet løfteprogrammet Nova. Et program med løftere, opplæring og personlig støtte for pleiere.

Hensikten med løfteprogrammet er å tilby et kostnadseffektivt sortiment som gjør det mulig for flere arbeidsplasser innen pleieyrket å investere i bedre arbeidsmiljø. For, med riktig hjelpemiddel på rett sted, kan vi minske antallet tunge løft. Nova er et godt gjennomarbeidet sortiment som består av: mobil personløfter, mobil oppreisningsløfter, takløftersystem, friløft, bøylor, seil og seler.

Ved å arbeide aktivt for et bedre arbeidsmiljø vil ikke 1 av 3 pleiere få skader. Ta gjerne kontakt med våre fagkonsulenter hvis du vil vite hva vi kan gjøre for å forbedre din arbeidssituasjon.

Etac er leverandør av hjelpemidler for personer med nedsatt bevegelse. Vi har i dag ca. 400 ansatte fordelt på Sverige, Norge, Danmark, Tyskland og England.

For mer informasjon om vårt løfteprogram Nova, se www.etac.no