



# Etac Nova 100 Løftemotor

Gir personalet frie hender

 **etac**<sup>®</sup>



## Sikre hjelpemidler skaper trygghet og tilstedeværelse.

Nova 100 løftemotor er utviklet med utgangspunkt i at produktet må være trygt, fleksibelt og enkelt å bruke. Målet er et enklere liv for personalet og en større følelse av verdighet for brukeren. Den robuste løftemotoren løfter uten problemer opp til 250 kg med en hastighet på 6 cm/sek. Det gir raske, sikre løft og brukeren trenger ikke å sitte på løfteren lengre enn nødvendig.

I tillegg har løftemotoren myk start-/stoppfunksjon som gir en jevn løftebevegelse av brukeren.

Ved overbelastning vil dette angis med en summetone, noe som gir økt sikkerhet. Tydelig merket nødstop og nødsenkmechanisme. Nova 100 løftemotor er basert på nyeste teknologi med fokus på lavt strømforbruk. Den batteridrevne løftemotoren garanterer 120 løft med maksimal belastning på et fulladet batteri, noe som gir ekstra sikkerhet ved strømbrytning. Samtidig lades batteriet hver gang løftemotoren senkes. Nova 100 løftemotor er enkel å bruke, noe som gir personalet god kontakt med brukeren. Dette fører til at brukeren føler større trygghet og nærvær.

## Teknisk data

Maks brukervekt:	250 kg	Nødsenk:	Ja
Batterilader:	3-trinnsleder 24V DC 1,5 A max	Advarsel ved lav batterispenning:	Ja
Ladetid:	7 timer	Advarsel ved overskridelse av maks belastning:	Ja
Løftehastighet:	6cm/sek	Maks mål fra tak (liten skinne):	2880 mm
Mål løftemotor:	B 325 mm x H 165 mm x D 184 mm	Minstemål fra tak (liten skinne):	380 mm
Vekt løftemotor:	10,5 kg	Løftebånd, lengde	2500 mm
Løftebånd:	Bredde 35mm, tykkelse 1 mm	Elektrisk tilkobling av laderen:	100-240V, 50-60Hz
Motor beskyttelsesklasse:	IP20	Fyller kravene iht:	ISO 10535, EN 60601-1, EN 60601-1-2
Beskyttelsesklasse håndkontroll:	IP54	MDD/93/427EEC	
Myk start-/stop:	Ja	Garantitid:	6 år
Nødstop:	Ja		





*Hurtigkopling for enkel forflytning*

*Hurtigkopling for enkel forflytning*

*Løftehastighet 6 cm/sek*

*Summetone ved overbelastning*

*Maks brukervekt 250 kg*

**Artikkel**

**HMS art.nr.**

**Art.nr**

Nova 100 løftemotor inkl. løftebøyle

xxxxx

16019001

Løpevognmotor (motordr. løpevogn) inkl. 4 funksjons håndk.

xxxxx

82162



### Brukervennlig håndkontroll

Den ergonomisk utformede håndkontrollen til Nova 100 løftemotor har en enkel og oversiktlig design, som gjør den enkel å bruke. Håndkontrollen viser tydelig batteriets status, og når den ikke er i bruk, plasseres den i holderen for vedlikeholdslading.



### Hurtigkopling

Hurtigkobling mellom løftemotor og løpevogn gjør det lett å montere og flytte løftemotoren - uten bruk av verktøy. Det er derfor mulig å flytte løftemotoren, hvis det er bruk for den i et annet rom



### Løpevognmotor

Nova 100 løftemotor er klargjort for bruk sammen med løpevognmotoren, noe som gjør tyngre løft mulig. Løpevognmotoren er enkel å montere på løftemotoren uten verktøy.

Inkl. 4-funksjons håndkontroll.



### Hurtigkopling av løftebøylen

Bytte av løftebøyle gjøres enkelt og raskt ved bruk av hurtigkopling. Spindelfunksjonen sitter på løftebåndet og sikrer at det ikke flytter eller vrir seg under bruk. Det er fem forskjellige løftebøyer, som alle er blant de beste i markedet.

## Rett bøyle gir økt stabilitet og komfort

Fire ting avgjør valget av løftebøyle: Brukerens bredde og vekt, fysisk tilstand og hvilken type løfter som benyttes. Riktig type løftebøyle medfører ikke bare et mer komfortabelt løft for brukeren, men også et sikrere og mer stabilt løft. Bredden på bøylene påvirker løftet, og størrelsen bør være i samsvar med brukerens skulderbredde, for et godt og trygt løft.

### Nova løftebøyer

Nova løftebøyer er markedets letteste bøyer. De er enkle å betjene og rengjøre. Alle bøylene har hurtigkopligng som gjør det enkelt å veksle mellom ulike modeller. Alle bøyer kan brukes både på løftemotoren, friløfteren og mobil personløfter.

### Tilbehør



#### 2-punktsbøyle, 30 cm bred.

**Art nr.** 81560

Mindre modell, også for barn.

Myk polstring og faste sikkerhetslåser som hindrer avkroking.



#### 2-punktsbøyle, 45 cm bred.

**Art nr.** 81561

Standard størrelse.

Myk polstring og faste sikkerhetslåser som hindrer avkroking.



#### 2-punktsbøyle, 50 cm bred.

**Art nr.** 81562

Bredere modell .

Myk polstring og faste sikkerhetslåser som hindrer avkroking

## Mer tilbehør



### Kryssbøyle\*, 50 x 25 cm

**Art nr.** 81563

Kryssbøylen brukes når man ønsker større avstand mellom løfteseilets ben og ryggbånd. Fire kroker gir løftet ekstra stabilitet. Samtidig fordeles vekten over en større flate, noe som bidrar til økt komfort for brukeren. Myk polstring og faste sikkerhetslåser som hindrer avkroking

\* OBS! Kryssbøylen skal ikke brukes sammen med seil med lav rygg.



### Kryssbøyle\*, 50 x 40 cm.

**Art nr.** 81564

Den større modellen åpner hoftevinkelen mer, sammenlignet med de mindre kryssbøylene. Denne kryssbøylen gir større helling bakover i seilet.

Myk polstring og faste sikkerhetslåser som hindrer avkroking

\* OBS! Kryssbøylen skal ikke brukes sammen med seil med lav rygg.



### Bøyleholder

**Art nr.** 81568

Holder som festes på veggen for oppbevaring av bøylor og seil.



### Nova Vekt

**Art nr.** 81569

En digital vekt som passer til Etac Nova 100 løftemotor og Nova 300 personløfter.

Vekten koples på mellom løftebåndets fester og løftebøylen, med hurtigkopling.

Slik kan Nova vekten enkelt brukes på flere Nova løftere.

Maks brukervekt 350 kg.

## Et løfteprogram utviklet for pleiere.

I samarbeid med helse- og omsorgssektoren har vi utviklet løfteprogrammet Nova. Et program med løftere, opplæring og personlig støtte for pleiere. Målet med løfteprogrammet er å tilby et kostnads-effektivt sortiment som gjør det mulig for flere arbeidsplasser i helsesektoren å investere i et bedre arbeidsmiljø. For med rett hjelpemiddel på rett plass, kan vi redusere mengden av tunge løfteoperasjoner. Nova er et grundig gjennomarbeidet sortiment bestående av mobile personløftere, mobil oppreisningsløfter, takløftersystem, friløfter, bøylar, seler og seil.

Ta kontakt med våre eksperter hvis du vil vite hva vi kan gjøre for å forbedre arbeidsplassen din.

Etac er en totalleverandør av hjelpemidler for personer med nedsatt bevegelse. Vi er for tiden rundt 500 ansatte fordelt på Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, England og Nederland.

For mer informasjon om vårt løfteprogram Nova se [www.etac.no](http://www.etac.no)