

VIKTIG SIKKERHETSBEKJED

Etac Nova løftebøyler Ref. Etac335

Anderstorp 23.05.2011

Gjeldende produkter	Art nr
Løftebøyle 30 cm	81560
Løftebøyle 45 cm	81561 (standard på Nova 300 løfter)
Løftebøyle 50 cm	81562
Kryssbøyle 50 x 25 cm	81563
Kryssbøyle 50 x 40 cm	81564



Etac Nova løftebøyler brukes ved løft av pasienter enten med takløfter eller mobile løftere.

Tiltak: Tilbakekalling av løftebøyle

Beskrivelse av problemet

Etac løftebøyle har ved enkelte tilfelle vist seg å ha blitt brukt feil på to måter, noe som har skapt fare for at selen kan løsne fra låsen under løftet. Det kan skje selv om løftebøylen er utstyrt med låsesperre.

Faren for feilbruk kan oppstå når man henger selens løkke på låsens øverste del, noe den ikke er beregnet for, se fig. 1.

Låsens øvre del kan dermed bøyes utover til siden mens pasienten løftes, med den følge at selen kan skli ut av låsen.

Faren kan oppstå hvis løftebøylen står skjevt (på skrå) uten at stillingen korrigeres under løftet, i kombinasjon med at selens løkker belaster låsens sluttstykke øverst, se fig. 2. I slike tilfelle kan låsen bli bøyd til siden mens pasienten løftes, med den følge at selen kan gli ut av låsen.



Figur 1



Figur 2

Løftebøylen kan fortsatt brukes uten fare, under forutsetning av at feilbruk, som beskrevet over, unngås.

Korrigerende sikkerhetstiltak i markedet

Kunden anmodes om å informere brukere av Etac Nova løftebøyer om nevnte fare.

For å eliminere faren for feilbruk tilbyr Etac å bytte til ny modell av løftebøylen, der de beskrevne farer for feilbruk er fjernet. Dette dokument sendes alle kunder som har kjøpt løftebøyle, uansett om den er levert separat eller sammen med en løfter.

Vedlagt følger et skjema for kontaktinformasjon som skal leveres/sendes Etac Norge AS.

Etac sender ut denne sikkerhetsbeskjeden fra 30.05.2011. Etac tar deretter kontakt med kunden for å avtale bytte av produkt. Kunder som ikke har blitt kontaktet av Etac før 17.06.2011 oppfordres til å kontakte oss. Bytte av produkt beregnes gjennomført innen 30.09.2011.

Undertegnede bekrefter herved at denne informasjon er rapportert til aktuelle offentlige myndigheter.

Etac AB

Lars Erik Gårdeskog
Kvalitets- og Miljøsjef

Etac Nova løftebøylor bekreftelse

Vi har mottatt og informert personalet om denne viktige sikkerhetsinformasjonen.

Dato: 23.05.2011

Jeg bekrefter at:

- Samtlige brukere innen mitt ansvarsområde har fått informasjon om denne viktige sikkerhetsinformasjon.
- Følgende antall Etac Nova løftebøylor vil bli tatt ut av bruk og returnert, eller destruert, når Etac har levert ny modell i tilsvarende antall.

Gjeldende produkter	Art.nr.	Antall
Løftebøyle 30 cm	81560	_____
Løftebøyle 45 cm	81561	_____
Løftebøyle 50 cm	81562	_____
Kryssbøyle 50 x 25 cm	81563	_____
Kryssbøyle 50 x 40 cm	81564	_____

Mitt ansvarsområde med hensyn til Etac Nova løftebøylor er:

Stilling eller ansvarsområde

Navn arbeidssted

Adresse, e-post, telefonnr.

Signatur

Navn i blokkbokstaver

Dato

VENNLIGST FYLL INN BLANKETTEN OG SEND DEN TIL:

Etac Norge AS, Pb. 249, 1501 Moss

Eller e-post hovedkontor.norge@etac.com, eller faxnr. 69270911