

Posisjonierende puter

Avlastning for kroppen

Posisjonierende puter

Multifunksjonelle posisjonierende puter



Rhombomed® Multipute (pute med flere kammer)

- Multifunksjonell
- Drenasjeleie
- Til diverse liggestillinger og stabilitetsleie
- Bobath liggestillinger

Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomullstrekk	Inkontinensleie
75 x 75	LY43.077	144987	LY51.077	LY59.077
63 x 75	LY43.036		LY51.036	LY59.036

Multiputen kan på grunn av sin oppdeling og form brukes på svært mange måter. For eksempel for å støtte arm eller ben (arm eller benrampe), som pølle, eller for å stabilisere ryggen i sittende eller liggende stilling.

Eksempler på bruksområder: Venøse sykdommer, ødemer, forebygging av trykksår (hælavlastning).



Rhombomed® Rhombi

- Sansestimulering
- Ideell pute for mikroposisjonering
- Økt fornemmelse av kroppen og kroppens grenser
- Utfyllende stabilisering av kroppsdeler

Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomullstrekk	Inkontinensleie
15 x 30	LY46.900		LY51.901	LY59.901

Mikroposisjonering: Å gi minimale endringer i kroppens posisjon, stimulere oppfatningen av kroppens plasseringen i rommet og kroppens grenser. Minimale endringer i posisjonen endrer også trykkplasseringen mot underlaget, og hjelper til å minske liggetiden. Mikroposisjonering er også å støtte kroppsdeler for å kreere mer stabilitet, endringene etterligner kroppens egne mikrobevegelser i forbindelse med trykkfordeling.



Rhombomed® Senso pølle

- Mange anvendelsesområder
- Sansestimulering
- Økt fornemmelse av kroppen og kroppens grenser
- Stimulert kroppsoppfatning
- Stabiliserende og støttende ved posisjonering
- Trykkfordelende som sårprofylakse

Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomullstrekk	Inkontinensleie
Ø 12 x 140	LY46.500		LY51.501	LY59.501
Ø 12 x 250	LY46.600		LY51.601	LY59.601

Senso pøllen brukes fortrinnsvis som sansestimulering. Ved å drapere pøllen langs og delvis under kroppen stimulerer Rhombomed Senso pøllen sansene og kroppsoppfattelsen. Pøllen stabiliserer kroppen i liggende stilling, og gir dermed forbedret søvn.

Eksempler på bruksområder: Sansestimulering, mikroposisjonering, stabilisering, trykksårprofylakse.



Posisjonierende puter

Posisjonierende puter for bedre pleie



Rhombomed® ryggpute med klaff

- Sikker og stabil posisjonering
- Stillingsendringer (eller posisjonering) ved forebygging av trykksår hos urolige pasienter



Rhombomed ryggpute med klaff er fylt med polypropylen kuler og Rhombomed-fill skumbiter. Med pasienten i sideleie blir klaffen lagt under overkroppen, pasienten legges i 30° sideleie og pga pasientens kroppsvekt ligger puten stabilt og sikkert på plass til neste vending. Stabiliserer og støtter i 30° stilling.

Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomullstrekk	Inkontinestrek
60 x 80	LY41.934			
90 x 65	LY41.937			
50 x 40	LY41.930			



Rhombomed® pølle

- Mangfoldige bruksmuligheter som posisjoningshjelp
- Sansestimulering
- For stabiliserende posisjonering
- Økt fornemmelse av kroppen og kroppens grenser
- Økt mulighet for egenbevegelser
- Ammepute



Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomullstrekk	Inkontinestrek
Ø 20 x 100	LY46.100		LY51.101	LY59.101
Ø 20 x 220	LY46.200	045600	LY51.201	LY59.201

Stillingsendringer for dekubitusforebygging, befordring av kroppsoppfatningen, kontrakturforebygging. Pøllen kan brukes til flerfoldige posisjoneringer i liggende og sittende. For å stabilisere et trykkfordelende 30° sideleie, rygg eller mage, for å stabilisere et vanlig sideleie eller ryggleie, for stabilisering i halvt sittende stilling i seng, stol eller rullestol. Pøllen gir en god trykkfordelende effekt i de fleste posisjoner. Kan også brukes til å frilgge kroppsdelene fra underlaget. Ideell til mikroposisjonering. Pøllens kontaktflate stimulerer sansene, gir økt fornemmelse av kroppen og kroppens grenser. For noen brukere kan man med fordel bruke den slankere Senso pøllen, da den gir litt mindre sanseinformasjon tilbake til kroppen. Rhombomed pøllens tykkelse kan gi pasienten et stabilt utgangspunkt for egenbevegelser.



Posisjonering ad modum Klein

- Mikroposisjonering
- Økt fornemmelse av kroppen og kroppens grenser
- Økt mulighet for egenbevegelser



	Størrelse i cm	Art.nr.	Bomullstrekk	Inkontinestrek
Halv pølle	25 x 9 x 4,5	LY46.300	LY51.301	LY59.301
Kilepute	25 x 20 x 10	LY46.400	LY51.401	LY59.401

Posisjonering ad modum Klein er basert på kinestetisk posisjonering. Denne form for posisjonering er basert på erkjennelsen av en pasients behov for mobilitet og egenbevegelser, og å hjelpe og stimulere pasienten til dette.



Posisjonerende puter

Basisprodukter for bedre pleie



Rhombo-fill® Universalpute

- Mange bruksområder
- Komfort og avlastning
- Endring av stilling

Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomulls-trekk	Inkontinen-strekk
23 x 40	LY32.804		LY51.004	LY59.004
25 x 80	LY32.805		LY51.105	LY59.105
40 x 60	LY32.818		LY51.018	LY59.018
45 x 80	LY32.823		LY51.023	LY59.023



Pute fylt med Rhombo-fill skumbiter, optimal volumiøs for trykkfordeling, frilegging eller komfortabel posisjonering.



Rhombo-med® posisjoneringspute

- Mange bruksområder
- Stabil posisjonering
- Mulig som oppbyggningspute

Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomulls-trekk	Inkontinen-strekk
20 x 30	LY40.202		LY51.002	LY59.002
25 x 80	LY40.205	113688	LY51.005	LY59.005
30 x 40	LY40.206		LY51.006	LY59.006
40 x 60	LY40.218		LY51.118	LY59.118
40 x 80	LY40.219		LY51.018	LY59.019
45 x 90	LY40.275		LY51.075	LY59.075
50 x 70	LY40.226		LY51.026	LY59.026



Pute fylt med Rhombo-fill skumbiter, optimal volumiøs for trykkfordeling, frilegging eller komfortabel posisjonering.



Rhombo-med® posisjoneringspute ekstra lang

- Stabiliserende posisjonering
- Ekstra lang pute til posisjonering av hele benet
- Stimulert kroppsopfatning

Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomulls-trekk	Inkontinen-strekk
55 x 90	LY42.876	065723	LY51.076	LY59.076



Pute fylt med Rhombo-fill skumbiter, optimal volumiøs for trykkfordeling, frilegging eller komfortabel posisjonering.

Posisjonerende puter

Basisprodukter for profesjonell posisjonering



Rhomboskumbiter® oval pølle

- For komfortabel trykkfordeling og frilegging

Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomullstrekk	Inkontinensstrekk
Ø 14 x 22 x 55	LY32.781	113701	LY51.081	LY59.081

Rhomboskumbiter oval pølle er fylt med Rhomboskumbiter skumbiter. Pøllen kan brukes til frilegging eller som myk og komfortabel støtte av forskjellige kroppsdeler. Pøllen kan også brukes som støttepute ved kontrakturprofylakse.



Rhomboskumbiter® posisjoneringsring

- For lokal komfort og frilegging

Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomullstrekk	Inkontinensstrekk
Ø 20	LY32.484		LY51.084	LY59.084

Posisjoneringsringen i Rhomboskumbiter skumbiter er særdeles egnet til lokal frilegging av utsatte kroppsdeler som hæl, ankel, albue, kne, hånd og øre. Liggende i sideleie kan den også brukes mellom knærne og som trykkfordeling ved skuldrene.



Rhomboskumbiter® universal krave

- Som støtte for forskjellige kroppsdeler
- Komfort og frilegging

Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomullstrekk	Inkontinensstrekk
Ø 40	LY32.586		LY51.086	LY59.086

Universalkraven har mange bruksområder. Den kan brukes i liggende posisjon som støttekrave rundt nakken. Den kan brukes i sideleie for å frilegge ører, og i noen tilfeller under setet for bedring av sittekomfort.



Posisjonerende puter

Basisprodukter for profesjonell posisjonering



Rhombosoll® hodepute

- 6-kammer system gir ideell støtte i side- og ryggeleie
- Nakkemuskulaturen slapper av
- Støtter halshvirvlene
- Langvarig virkning



Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomullstrekk	Inkontinestrek
40 x 80	LY21.323		LY51.123	LY59.123

Rhombosoll hodepute er inndelt i 6 kamre, dette gir en ideell støtte til hode og nakke i rygg- og sideleie. På grunn av Rhombosoll skumbiter er det god utlufting og fuktfordeling i puten. Passer bra for den som har stiv nakke, hodepine osv.



Rhombosoll® nakkekrave

- For stabil hvilestilling
- For avlastning

Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomullstrekk	Inkontinestrek
Ø 50	LY41.387		LY51.087	LY59.087

Nakkekraven med Rhombosoll fylt med polsterkuler og Rhombosoll skumbiter gir mulighet for stabil, langvarig hvile av hode og nakke i rygg-, sideleie og sittende stilling.



Rhombosoll® hodekrave

- For sikker og stabil posisjonering av hodet
- Kravens størrelse er justerbar med borrelås
- Leveres med bomullstrekk som standard

Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomullstrekk	Inkontinestrek
Ø 36	LY43.685		LY51.085	LY59.085

Hodekraven er fylt med polsterkuler og Rhombosoll skumbiter. Kravens størrelse kan tilpasses pasienten ved bruk av borrelås. Gir ryggliggende pasient meget stabil og komfortabel hodestilling. Kraven leveres som standard med bomullstrekk.



Posisjonierende puter

Basisprodukter for profesjonell posisjonering



Rhombo-fill® komfortpute

- Komfortabel posisjonierende og målrettet avlastning
- Anvendelig i sittende og liggende stillinger

Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomulls-trekk	Inkontinens-trekk
60 x 75	LY33.132		LY51.032	LY59.032



Komfortputen er utviklet med tanke på komfort i sittende stilling. Sporet i midten er for å avlaste utsatte områder i liggende og sittende stilling. Den er også godt egnet som ryggpute i sittende stilling for å beskytte ryggraden mot trykkbelastning.

Eksempler på bruksområder: Smerter i seteregionen, trykksårforebyggende i seteregionen, spesifikk trykk- eller smerteavlastning på andre området i liggende eller sittende stilling.



Rhombo-fill® sitering

- Komfort og avlastning
- Frilegging i seteregionen

Brukervekt	Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomulls-trekk	Inkontinens-trekk
> 60 kg	Ø 50/12	LY31.188		LY51.188	LY59.188
< 60 kg	Ø 50/12	LY.31.088		LY51.088	LY59.088



Sitteringen gir lokal frilegging i seteområdet. Den leveres for to vektklasser, avhengig av brukervekt. Modellen for brukervekt opp til 60 kg er uten bunnforsterkning, modellen for brukervekt over 60 kg har bunnforsterkning.

Posisjonerende puter

Basisprodukter for profesjonell posisjonering



Rhombo-med® leggpute stor

- For optimal og individuell høy plassering av ben
- Former seg fullstendig etter leggen
- Avlaster korsryggen
- Forbedrer venøs blodsirkulasjon



Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomullstrekk	Inkontinestrek
69 x 63 x 20	LY44.140		LY51.040	LY59.040

Veneputen støtter og posisjonerer plassering av bena ved venøse problemstillinger. Kan også brukes til avlastning av korsryggen. Materialet former seg helt etter brukerens leggform og gjør den venøse blodsirkulasjonen bedre.

Eksempler på bruksområder: Venøse problemstillinger, lumbale problemstillinger, ødemer i ben, trombose, leggmuskelkramper, varicer, trette ben og hovne ankler.



Rhombo-med® pølle rund

- Til stabilisering og posisjonering av enkelte kroppsdeler



Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomullstrekk	Inkontinestrek
Ø 18 x 55	LY42.983		LY51.183	LY59.183

Den runde pøllen brukes til stabilisering og posisjonering av enkelte kroppsdeler, spesielt velegnet under knærne.

Eksempler på bruksområder: Magesmerter, avspenning i mageregionen, avlastning av korsryggen i ryggleie.



Rhombo-med® leggmansjett

- Spesifikk frilegging av hælene
- Hindrer kraftige benbevegelser



Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomullstrekk	Inkontinestrek
55 x 20 x 8	LY30.328	054894		

Leggmansjettet i Rhombo-med polyuretankuler og Rhombo-fill skumbiter frilegger hælen. Mansjettet festes rundt leggen og hindrer pasienter med kraftige benbevegelser i å få hælen ned i underlaget.

Eksempler på bruksområder: Frilegging av hælene som trykksårprofilakse for demente pasienter

Posisjonerende puter

Basisprodukter for profesjonell posisjonering



Rhombomed® underarmsmansjett

- Høy plassering av underarmen

Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomullstrekk	Inkontinensstrekk
40 x 16 x 13	LY40.612			



Underarmsmansjetten i Rhombomed polyuretankuler og Rhombomed-fyll skumbiter posisjonerer armen på en sikker måte. Mansjetten festes rundt armen og reduserer pasientens mulighet til å legge armen flatt i sengen.

Eksempler på bruksområder: Ved infusjoner, ødemer, kontraktur forebygging.



Rhombomed® kilepute for arm

- Høy plassering av armen

Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomullstrekk	Inkontinensstrekk
35 x 20 x 12	LY40.707		LY51.007	LY59.007
80 x 25 x 25	LY40.744		LY51.044	LY59.044



Kilepute for arm gir mulighet for skråstilling av underarmen, eller hele armen.



Rhombomed® pute for hjerteavlastning

- Ideell hvilestilling av ekstremiteten
- Hindrer at pasienten sklir ned ved sittende posisjon i sengen
- Avlaster hjertet
- Avspenning

Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomullstrekk	Inkontinensstrekk
70 x 57	LY33.000			



Putesystemet består av 3 deler, de forskjellige elementene kan tas ut helt eller delvis for å variere putehøyden. Puten legges under bena og øker dermed sittekomforten. Enkel å tilpasse ulike benlengder.



Posisjoningssett

Posisjoningsputer sett

Forebyggende og behandlende



RHOMBO-MEDICAL® basis posisjoningspute sett

- Mange posisjoningsmuligheter som er forebyggende og behandlende

	Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomulls-trekk	Inko trekk
Basis posisjoningspute sett		LY99.005		LY95.105	LY95.905
Består av: Komfortpute	60 x 75	LY33.132		LY51.032	LY59.032
Universalpute	45 x 80	LY32.823		LY51.023	LY59.023
Multipute	75 x 75	LY43.077		LY51.077	LY59.077

Posisjoningssettet er det optimale basis putesettet for pleieren. Med en enkelt pute, eller i kombinasjon med en eller flere puter i settet, kan man posisjonere pasienten i mange forebyggende eller behandlende posisjoner.

Eksempler på bruksområder: Trykksårforebyggende, venøse problemstillinger, kontrakturprofylakse, pallativ behandling, smertepasienter, osteoporose.




RHOMBO-MEDICAL® putesett universal

- Komfortabelt posisjonerende
- Mange kombinasjonsmuligheter

	Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomulls-trekk	Inko trekk
Universal putesett		LY99.002		LY95.102	LY95.902
Består av: 6 stk Rhombo-fill universalputer	45 x 80	LY32.823		LY51.023	LY59.023

Dette posisjoningssettet består av 6 Rhombo-fill universalputer i størrelse 45x80cm. Putesettet kan brukes på forskjellige måter for å avlaste hele eller deler av kroppen

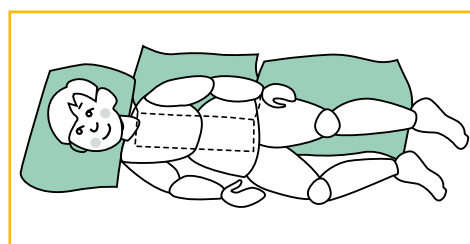

Posisjoneringssputer sett

Forebyggende og behandlende



Bobath posisjoneringssett består av 6 forskjellige puter som i ulike kombinasjoner kan brukes innen rehabilitering og pleie. Konsistensen på innholdet i putene gir god sensorisk stimulering av den affiserte siden og kan hjelpe til med å normalisere tonus.

Eksempler på bruksområder: Slag, hjerneblødninger, lammelser og andre sykdommer i det sentrale nerve-systemet.

RHOMBO-MEDICAL® posisjonering Bobath putesett

- Posisjonering etter Bobath-konseptet
- Sensorisk stimulering
- Øker kroppsbevisstheten

	Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomulls-trekk	Inko trekk
Basis posisjoneringssett		LY99.003		LY95.103	LY95.903
Består av: Hodepute 6-delt		LY21.323		LY51.123	LY59.123
Posisjoneringsspute	30 x 40	LY40.206		LY51.006	LY59.006
Posisjoneringsspute	45 x 90	LY40.275		LY51.075	LY59.075
Posisjoneringsspute ekstra lang	55 x 90	LY42.876		LY51.076	LY59.076
Ryggpute m/klaff	90 x 65	LY41.937			
Multipute	75 x 75	LY43.077		LY51.077	LY59.077



RHOMBO-MEDICAL AVT® lungeputesett

- Trykkfordelende og trykkavlastende
- Utallige kombinasjonsmuligheter
- Stimulerer kroppsoppfatningen



	Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomulls-trekk	Inko trekk
AVT lungeputesett		LY99.004		LY95.104	LY95.904
Består av: 2 stk Rhombo-med posisjoneringssputer	25 x 80	LY40.205		LY51.005	LY59.005

Putesettet består av 2 Rhombo-Med posisjoneringssputer 25 x 80 cm som over kortere eller lengre tid legges i en A, V eller T-form under overkroppen. Målet er å få bedre ventilering av spesifikke deler av lungesystemet.

Eksempler på bruksområder: Forebygging av lungebetennelse, forbedret lungeventilering, sansestimulering.



Posisjoneringsputer sett

Forebyggende og behandlende



RHOMBO-MEDICAL® Kinestetikk posisjoneringssett 1

- Kinestetisk posisjonering
- Basal stimulering
- Mikroposisjonering

	Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomullstrekk	Inko trekk
Kinestetikk posisjoneringssett I		LY99.017		LY95.117	LY95.917
Består av: Pølle	20 x 220	LY46.200		LY51.201	LY59.201
2 stk halvpøller ad modum Klein	25x9x4,5	LY46.300		LY51.301	LY59.301



RHOMBO-MEDICAL® Kinestetikk posisjoneringssett 2

	Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomullstrekk	Inko trekk
Kinestetikk posisjoneringssett II		LY99.027		LY95.127	LY95.927
Består av: 2 stk pøller	20 x 100	LY46.100		LY51.101	LY59.101
2 stk halvpøller ad modum Klein	25x9x4,5	LY46.300		LY51.301	LY59.301
2 stk kilepøller ad modum Klein	25x20x10	LY46.400		LY51.401	LY59.401

Kinestetikk posisjoneringssett I og II inneholder det ideelle utstyret for posisjonering etter konseptene for basal stimulering, kinestetikk og mikrostimulering. Stillingsendringer, terapeutisk posisjonering, sansestimulering og mye mer.



Posisjoneringsputer sett

Forebyggende og behandlende




RHOMBO-MEDICAL® sensopølle sett

- Basal stimulering
- Stimulert kroppsoppfatning
- Støttende og stabiliserende posisjonering

	Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomulls-trekk	Inko trekk
Sensopølle sett		LY99.009		LY95.109	LY.95.909
Består av: 2 stk Sensopøller	12 x 250	LY46.600		LY51.601	LY59.601

Begge rullene blir modulert langs kroppen, for eksempel i ryngleie. Pasienten kjenner omrisset av kroppen sin og får dermed styrket ulike sider av sin sansemotorikk.

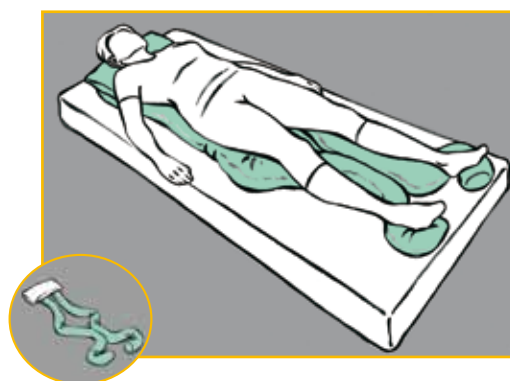


RHOMBO-MEDICAL® pustestimulerende sett

- Stillingsendringer
- Terapeutisk posisjonering og mye mer

	Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Bomulls-trekk	Inko trekk
Pustestimulerende sett		LY99.008		LY95.108	LY.95.908
Består av: 2 stk Rhombo-fill universalputer	25 x 80	LY32.805		LY51.105	LY59.105

Mildt støttende og uttøyende av brystkassen. Putesettet består av to Rhombo-fill universalputer som støtter pustemuskulaturen ved KOLS, astma, kronisk bronkitt, trykksårforebyggende.

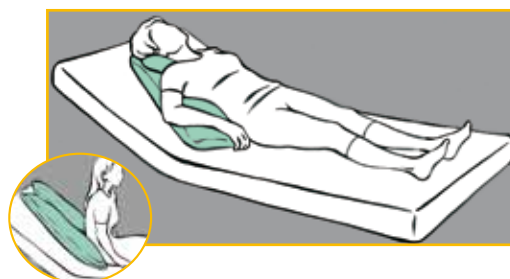

Puter for barn

Hos barn ser man veldig tydelig hvordan kroppen former seg for å få stabilitet mot underlaget. For barn er det enda viktigere enn for voksne å bli stabilisert og posisjonert riktig. Riktig posisjonering kan være med å forebygge feilstillinger. Ved posisjonering er det viktig at bekkenet og skuldrene er i samme plan, og at C-skoliose som kan oppstå ved sideleie blir mest mulig redusert.



Bildene viser Thomas som har fått store feilstillinger. I ryggeleie har vi brukt en senso pølle (LY46.500) for å stabilisere overkroppen og trekke skuldrene fremover, og for å stimulere kroppsoppfatningen. Til å posisjonere og stabilisere bekkenet og benene hans har vi brukt ett par Rhombo-med posisjoneringsputer (LY40.218 og LY40.2059). Hælene blir frilagt fra underlaget, og kroppen hans ligger relativt symmetrisk.



Katarina er en livlig, ung dame som har litt vanskelig for å finne en stabil liggestilling. Bildet viser Katarina i sideleie med en ryggpute med klaff (LY43.934) og en Multipute (LY43.077). Ryggputen kan ikke skli unna, og Multiputen sørger for symmetrisk posisjonering av bekkenet og benene.



Trekk til posisjonerende puter



Rhombo-Medical® bomullstrekk

Bomullstrekkene er glatte, smidige og formbare. Disse trekkene føles meget komfortable mot huden.

Materiale: 100% bomull
Farge: Beige
Kokvask (95°)



Rhombo-Medical® inkontinestrekk

Inkontinestrekkene er vann-, bakterie- og virustette. De er pustende, elastiske, desinfiserbare og vaskbare. Trekkene er i jerseymateriale med polyuretanbelegg. Belegget er behagelig mot huden.

Materiale: PES med PU belegg
Farge: Kremhvit
Uten PCV
Kokvask (95°)



Trekk til sitteputer



Rhombo-Medical® trekk Trevira CS

Trekkene består av Trevira CS stoff. De er brannhemmende, slitesterke, enkle å vaske og tørker raskt etter vask.

- Materiale 100% Trevira CS
- Farge Sort
- Brannhemmende
- God fuktregulering
- Lang levetid
- Tørker raskt



Sitteputer

Sitteputer og ryggputer



Rhombo-fill® artrose sittepute

- Ergonomisk sittestilling
- Enklere å reise seg opp
- Avlastning for hoftene
- Myk og komfortabel sittestilling
- Trykkfordelende

Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Trevira CS	Inko trekk
42 x 44	LY33.820		LY53.020	LY.59.020

Ved hofteartrose (slitasje) er artroseputen en enkel og god hjelp i hverdagen. Den gir en leddavlastende sittestilling og gjør det lettere å reise seg. Sete og lår synker behagelig ned i puten og man kan derfor opprettholde en behagelig sittestilling i mange timer.



Rhombo-fill® kilepute

- Stimulerer ergonomisk sittestilling
- God fukt- og varmeregulering
- Myk og komfortabel sittestilling
- Trykkfordelende

Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Trevira CS	Inko trekk
42 x 44	LY31.820		LY53.020	LY.59.020

Kileformet sittepute som stimulerer til å sitte rett, med bekkenet tiltet litt fremover. Dette gir mindre belastning på korsryggen.



Rhombo-fill® seteforhøyningspute

- Gjør det lettere å reise seg opp
- Fast kjerne med myk overflate
- Myk og komfortabel sittestilling
- Stabiliserer og holder bevegelig
- Kan brukes i alle typer stoler

Størrelse i cm	Art.nr.	HMS Art.nr.	Trevira CS	Inko trekk
43 x 43 x 8	LY34.622		LY53.022	LY.59.022

Seteforhøyningsputen gir meget god sittekomfort og god trykkfordeling takket være det oppdelte skummet, og putens inndeling i flere kamre.

Telefon 815 69 469

www.etac.no

www.smarteprodukter.as

Etac AS
Postboks 249, 1501 Moss
Telefon 815 69 469 - Faks 69 27 09 11
E-post hovedkontor@etac.no - Internett www.etac.no
Netthandel www.smarteprodukter.as


Skaper muligheter