

Kompensering for feilstillinger

av ROHO® QUADTRO SELECT® og ROHO® Contour Select® putene

ROHO® QUADTRO SELECT® HIGH PROFILE® putene kan kompensere for opptil 7,5 cm bekkenfeilstilling i lateral og/eller anterior/posterior retning.

Etter å ha justert luftmengden som beskrevet på side 14, steng ventilen og la brukeren sitte på puten i en riktig tilpasset rullestol.

- 1 og 2 Med Isoflo® Memory Control ventilen i åpen posisjon (grønn knapp trykket inn), plasseres bekkenet eller bena i ønsket posisjon. Luften mellom ROHO® putens kvadranter vil flytte seg og tilpasse seg den nye sittestillingen
- 3 Isoflo® ventilen stenges (rød knapp trykkes inn). Nå er posisjoneringen ferdig.
- 4 Det anbefales at man kontrollerer med håndsjekk at det fremdeles er tilstrekkelig med luft under sitteknutene.

De vanligste sittestillingstilpasninger er for skjev bekkenstilling, bakoverlippet bekken, mer oppbygging foran bekkenet, kompensasjon for hoftelidelser eller amputasjoner, kjøring med en eller begge føtter, med mer. Alle tilpasningene kan foretas uten at brukeren trenger å flytte seg ut av stolen.

