



Nova Friløfter – en stabil løfter for forskjellige miljøer

Friløfteren er et godt hjelpemiddel ved personløft i dagliglivet. Løfteren er stabil og monteres uten inngrep i tak og vegger. Med en stilren design i matt aluminium, passer den like godt i institusjoner som i hjemmet.

Frittstående og fleksibel

Nova Friløfter er et hendig hjelpemiddel til bruk ved daglige forflytninger, for eksempel fra seng, gulv, toalett og rullestol. Den frittstående løfteren består av en skinne som hviler på to ben. Friløfteren monteres på skinnen som finnes i flere bredder for å passe i de fleste miljøer. Løfteren er lett å demontere og flytte til et annet sted. Flexibiliteten understrekes av teleskopbena som kan innstilles i fire forskjellige høyder, for å passe til rommet og til løfterens bruksområde. Benas høydeinnstilling er enkel å endre med Quick Release koplingen.



Stabil

Stabil konstruksjon som kan løfte opp til 250 kg.

Hev og senkbar

Hev- og senkbare teleskopben med fire faste stillinger mellom 225 och 255 cm. Det er også en transportstilling i 170 cm.

Holder for håndkontroll


Det er forhåndstilpasset plassering av den ergonomisk utformede håndkontrollen.

Artikkel
Nova 700 Friløfter

Art.nr.
16011601

Energivennlig motor med 250 kg løftekapasitet

Den nye, kompakte løftemotoren er meget energivennlig, takket være en utveksling basert på nyeste teknologi. Motoren bygger på batteridrift og har kapasitet til å løfte 250 kg. Enkelhet kombinert med diskret design gjør at motoren passer i alle miljøer. Den er lett å bruke og styres med en brukervennlig, ergonomisk utformet håndkontroll. For å forenkle monteringen er motoren utstyrt med Quick Release kopling..

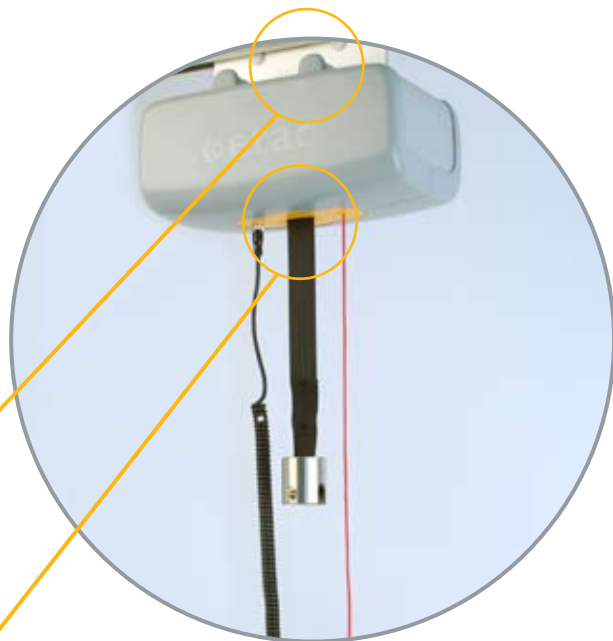


Quick Release kopling gir rask montering - uten verktøy. Lett å flytte fra rom til rom.



Gjennomtenkt design med feste for håndkontroll, løftebånd og nødstop.



Enkel og ergonomisk utformet håndkontroll.

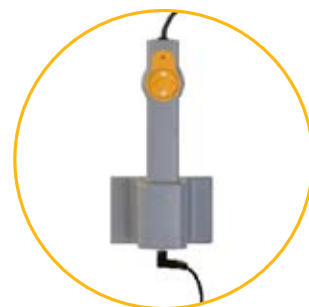

Praktisk holder til håndkontrollen som også fungerer som holder under lading.

Artikkel

Nova 100 Løftemotor inkl løftebøyle
Kjøremotor (Motordrevet kjørevogn) inkl. 4-funksjons håndkontroll

Art.nr.

16019001
81566

Teknisk informasjon


Maks brukervekt:	250 kg	Nødsenk:	Ja
Batterilader:	3-trinnslader 24V DC 1,5A maks	Varsel ved lav batterispenning:	Ja
Ladetid:	7 timer	Varsel ved overskredet maks last:	Ja
Løfthastighet:	6 cm/sek	Maks mål fra tak (smal skinne):	2880 mm
Mål løftemotor:	B 325 mm x H 165 mm x D 184 mm	Minimum mål fra tak (smal skinne):	380 mm
Vekt løftemotor:	10,5 kg	Løfthøyde:	2500 mm
Løftebånd:	Bredde 35 mm, tykkelse 1 mm	El tilkopling lader:	100-240V 50-60Hz
Beskyttelsesklasse motor:	IP 43		
Beskyttelsesklasse håndkontroll:	IP 54		
Nødstop:	Ja		



Riktig bøyle gir økt stabilitet og komfort

Fire ting avgjør valget av løftebøyle: Brukerens bredde og vekt, fysisk status og hvilken type løfter som benyttes.

Riktig bøyletype gjør ikke bare løftet mer behagelig for brukeren, men gjør det også sikrere og mer stabilt. Bøylens bredde påvirker løftet og størrelsen må stemme med brukerens skulderbredde for å oppnå et jevnt og sikkert løft. Hvis brukeren er utrygg kan en smalere bøyle holde løftet mer samlet, og dermed skape større trygghet. Er bøylene for bred for brukeren kan løftet føles ustabilt. Nova bøyler er markedets letteste bøyler. De er enkle å håndtere og rengjøre. Alle bøyler har en hurtigkopling som gjør det enkelt å bytte modell. Samtlige bøyler kan benyttes på takløfter, friløfter og mobil personløfter.

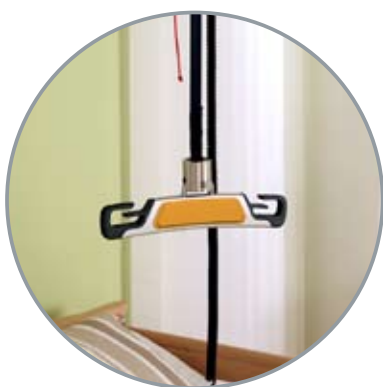

2-punktsbøyle Small 30 cm bred.
Art nr. 81560



2-punktsbøyle Medium 45 cm bred.
Art nr. 81561



2-punktsbøyle Large 50 cm bred.
Art nr. 81562



Kryssbøyle Small 50 x 25 cm
Art nr. 81563

Kryssbøylen brukes når man ønsker større avstand mellom løfteseilets ben og ryggband. Fire kroker gir løftet ekstra stabilitet. Samtidig fordeles vekten over en større flate, noe som bidrar til økt komfort.



Kryssbøyle Large 50 x 40 cm.
Art nr. 81564

Den store modellen åpner hoftevinkelen ytterligere, i forhold til den lille kryssbøylen. Denne kryssbøylen gir generelt større bakoverhelling i seilet.



Bøyleholder
Art nr. 81568

En holder til å feste på veggen for oppbevaring av bøyler og seil.



Teknisk informasjon

Maks brukervekt:	250 kg
Bredde (yttermål):	195-465 cm
Hev- og senkbar:	225-255 cm (10 cm intervall, 4 høyder)
Transporthøyde:	170 cm
Vekt (uten horisontalbjelke):	29,5 kg
Vekt balk:	6,2 kg/m
Farge:	Aluminium



Et løfteprogram utviklet for pleiere

Hver tredje anmeldte arbeidsskade innen pleie- og omsorgsyirket er forårsaket av tunge løft. Det forklarer hvorfor 7 av 10 pleiere opplever sitt arbeid som tungt. Det vil vi endre på.

I samarbeid med pleiere har vi utviklet løfteprogrammet Nova. Et program med løftere, opplæring og personlig støtte for pleiere.

Hensikten med løfteprogrammet er å tilby et kostnadseffektivt sortiment som gjør det mulig for flere arbeidsplasser innen pleien å investere i bedre arbeidsmiljø. For, med riktig hjelpemiddel på rett sted, kan vi minske antallet tunge løft. Nova er et godt gjennomarbeidet sortiment som består av: mobil personløfter, mobil oppreisningsløfter, takløftersystem, friløft, bøylor, seil og seler.

Ved å arbeide aktivt for et bedre arbeidsmiljø vil ikke 1 av 3 pleiere få skader. Ta gjerne kontakt med våre fagkonsulenter hvis du vil vite hva vi kan gjøre for å forbedre din arbeidssituasjon.

Etac er leverandør av hjelpemidler for personer med nedsatt bevegelighet. Vi har i dag ca. 400 ansatte fordelt på Sverige, Norge, Danmark, Tyskland og England.

For mer informasjon om vårt løfteprogram Nova, se www.etac.no