


R82[®] 

penguin[™]

Norsk bruksanvisning

N INNHOLDSFORTEGNELSE

Sikkerhet	4
Garanti	4
Vedlikehold	4
Penguin	5
Produkt	6
identifikasjon	6
Mål	7
Produsent	7
Tekniske data	7
Forhandler	7

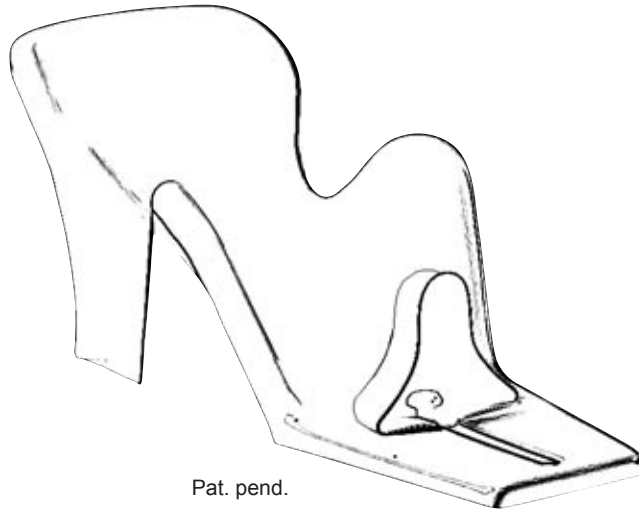


Pat. pend.

N PENGUIN BADESTOL

Penguin er en god sitte-/liggestøtte fra R82, som kan brukes i badekaret Orca og i standard badekar.

Det er primært beregnet til bruk ved bading og generelt stell, men er også godt egnet til lek.

Denne bruksanvisningen vil være til god nytte for å få full utnyttelse av produktet.

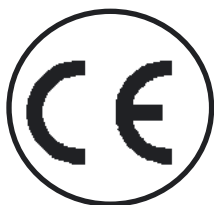

N SIKKERHET

Penguin er CE-merket. Dette er din garanti for at produktet oppfyller alle europeiske helse og sikkerhetskrav. Produktet er CE-merket i henhold til 93/42/EØF, klasse 1 av 14. juni 1993 – Direktiv om medisinsk utstyr.



Ved ombygging av produktet og ved bruk av uoriginale deler skal CE-merket fjernes fra produktet.



Etterlat aldri et barn i produktet uten tilsyn av en voksen. Feil bruk av produktet kan medføre alvorlige skader på brukeren. Kontroller jevnlig at alle seler er korrekt plassert, og at alle justeringer er forsvarlig utført.

N GARANTI

R82 gir 2 års reklamasjonsrett på produktet.

R82 A/S gir 12 måneders garanti på produktet. Garantien gjelder kun ved bruk av originale reservedeler og tilbehør, samt når tilpassingene er utført av R82 eller samarbeidspartnere. R82 kan ikke holdes ansvarlig for skader på produktet eller brukeren hvis det er brukt uoriginale reservedeler og tilbehør, eller hvis det er utført reparasjoner av andre enn R82 eller samarbeidspartnere.

N VEDLIKEHOLD

De runde og glatte overflatene er lette å rengjøre. Produktet bør rengjøres hver gang det har vært brukt.



Ikke bruk rengjøringsmidler med klor eller sprit.




Justeringer og endringer som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen skal kun utføres av R82 eller samarbeidspartnere.


N PENGUIN

- A) Penguin gir stor bevegelsesfrihet for armer og ben.
- B) Den stillbare abduksjonsklossen er lett å tilpasse den enkelt bruker.
- C) Sugekoppene gjør at Penguin fester seg godt til glatte flater.



Det er viktig at barnet alltid er under oppsyn når det oppholder seg i badestolen. Ved bruk i badekar, sjekk badevannstemperaturen før barnet plasseres i badestolen.

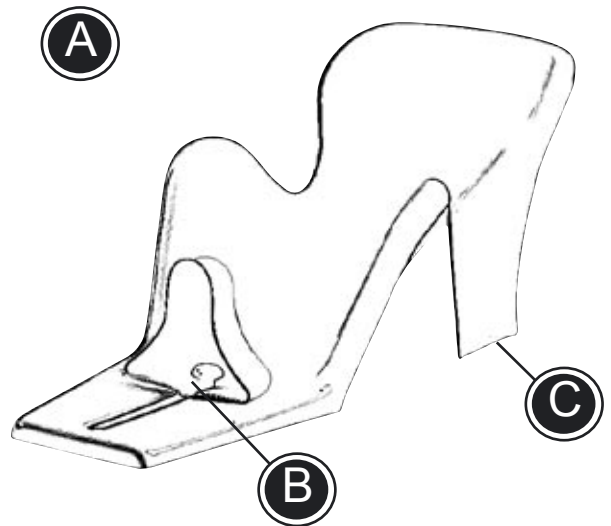

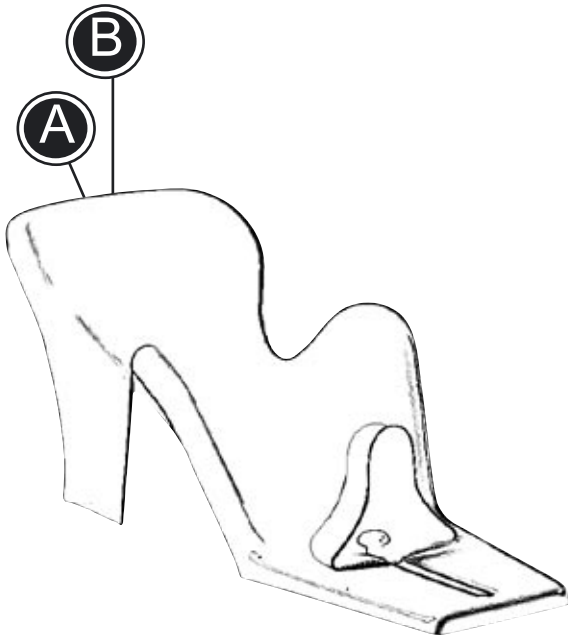

N PRODUKT IDENTIFIKASJON

A) Serienr.

Merket er plassert nederst bak på badestolen.

B) Produsent


Merket er plassert øverst bak på badestolen.

A



B

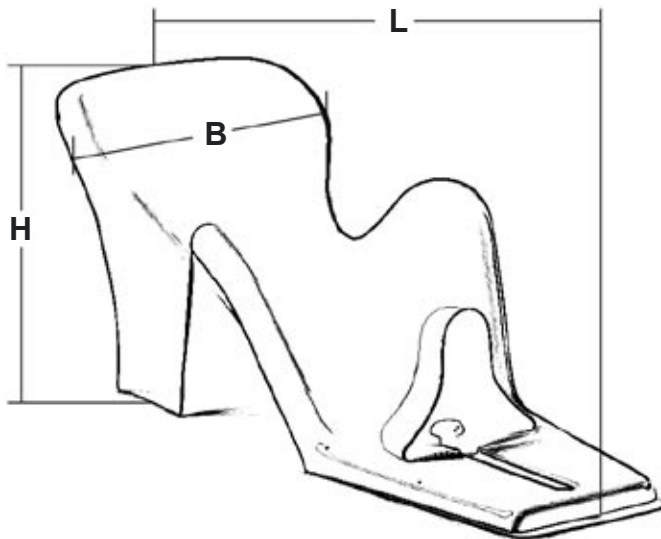

**N** MÅL

Lengde (L)	80 cm
Bredde (B)	33 cm
Høyde (H)	26 cm
Lengde, abduksjonskloss til overkant	56-72 cm
Bredde, innvendig, smaleste sted	16 cm
Vekt	1½ kg

N TEKNISKE DATA

Penguin er fremstilt av 6 med mer glatt, hvit PVC

N PRODUSENT

R82 A/S
Parallevej 3
8751 Gedved

N FORHANDLER

Find din forhandler på www.r82.dk